

Kit de laboratorio universal para pruebas de heces (Stool Testing Universal Laboratory, STUL) para microbiología

Información importante:

Lea todas las instrucciones antes de usar su kit y sígalas atentamente para evitar cancelaciones de la prueba o resultados inexactos.

Todos los recipientes deben llenarse adecuadamente, según se indica en las instrucciones a continuación, y etiquetarse de manera legible con nombre y apellido, fecha de nacimiento (Date of Birth, DoB) y fecha y hora de recolección.

NO use ciertos medicamentos durante al menos 48 horas antes de la recolección de las heces. Comuníquese con sus proveedores de atención médica e interrumpa temporalmente el uso de antiácidos, bismuto, medicamentos antidiarreicos o laxantes oleosos.

Si su proveedor requiere más de una recolección de heces, recolecte las heces en días diferentes con un kit STUL diferente para cada recolección.

Precaución:

Algunos viales de recolección de heces contienen líquido que puede ser nocivo para la piel o si se traga. No beba ni deseche el líquido en los viales de recolección. Si el líquido se ingiere accidentalmente, comuníquese con el control de intoxicaciones de inmediato al 800.222.1222.

Revise los materiales de su kit:

1. Bolsas para materiales de riesgo biológico y hojas absorbentes (X3)
2. Recipiente estéril azul
3. Varilla de madera
4. Vial de sensibilidad y cultivo anaranjado
5. Vial EcoFix™ verde
6. Bolsa blanca del kit
7. Etiquetas de información para el paciente (X3)

Contenido del kit



1. Bolsas para materiales de riesgo biológico y hojas absorbentes (3)



2. Recipiente estéril azul



3. Varilla de madera




4. Vial de sensibilidad y cultivo anaranjado



5. Vial EcoFix™ verde



6. Bolsa blanca del kit

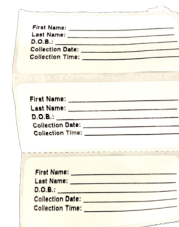

7. Etiquetas de información para el paciente (3)

Otros materiales necesarios

(no se proporcionan en el kit)

- Bolígrafo negro o azul
- Recipiente de recolección de heces limpio (p. ej., sombrero de recolección, orinal, cesto de residuos con bolsa de plástico)

Paso 1: Prepare etiquetas de información para el paciente.

Paso 1A

- Si sus viales de muestra llegaron etiquetados previamente, confirme que su nombre completo y fecha de nacimiento sean correctos. Si son incorrectos, comuníquese con el Servicio al Cliente del laboratorio al 216.444.5755 para obtener instrucciones para su laboratorio más cercano para la corrección.
- Si los viales no vienen etiquetados previamente, use un bolígrafo para escribir su nombre y apellido completos, y la fecha de nacimiento (DoB) en cada una de las 3 etiquetas de información del paciente.

Paso 1B

- Escriba la fecha y hora de recolección en cada una de las 3 etiquetas de información del paciente.

Paso 2: Etiquete los viales de muestra.

- En una posición vertical (de arriba a abajo), etiquete cada uno de los tres viales del paciente (recipiente estéril azul, vial de sensibilidad y cultivo anaranjado, y vial EcoFix™ verde).

Nombre del paciente:	<u>Juan</u>
Apellido del paciente:	<u>Doe</u>
Fecha de nacimiento:	<u>00/00/0000</u>
Fecha de recopilación:	<u>00/00/0000</u>
Hora de recolección:	<u>12:00 p. m.</u>

Paso 3: Orine y luego tire de la cadena.

Paso 4: Realice las preparaciones para la recolección de heces.

- Coloque el sombrero de recolección de heces debajo de la parte posterior del asiento del inodoro. Alternativamente, se puede usar un orinal o un cesto de residuos con una bolsa de plástico para recolectar las heces.

Paso 5: Defeque.

- Asegúrese de que las heces caigan dentro del recipiente de recolección. **NO** recolecte heces sumergidas en agua del inodoro o contaminadas con orina.

Paso 6: Transfiera las heces.

A. Vial EcoFix™ verde.

- Desenrosque la tapa verde del vial EcoFix™. Utilizando la paleta adherida a la tapa, agregue las heces al vial hasta que el líquido en el interior del vial llegue a la línea roja de llenado marcada en la parte exterior del recipiente (consulta la imagen anterior).
- Vuelva a tapar el vial verde, séllelo herméticamente y agítelo vigorosamente durante 10 segundos.

Nota: Llene cada vial hasta la línea roja. No llene de más ni de menos



B. Vial de sensibilidad y cultivo anaranjado

- Desenrosque la tapa anaranjada del vial de cultivo y sensibilidad. Utilizando la paleta adherida a la tapa, agregue las heces al vial hasta que el líquido en el interior del vial llegue a la línea roja de llenado marcada en la parte exterior del recipiente.
- Vuelva a tapar el vial, séllelo herméticamente y agítelo vigorosamente durante 10 segundos.

C. Recipiente estéril azul.

- Desenrosque la tapa azul del recipiente estéril. Desenvuelva la varilla de madera proporcionada y úsela para agregar las heces al recipiente azul hasta que esté entre 1/4 y 1/2 lleno. Selle herméticamente (no es necesario agitar).

Paso 7: Limpiar.

- Elimine las heces restantes en el inodoro, deseche los materiales usados en la basura (excepto los viales de recolección) y lávese las manos.

Paso 8: Envase los viales de muestra.

- Coloque cada vial en su propia bolsa para materiales de riesgo biológico y selle cada bolsa cerrada herméticamente.
- Coloque las tres bolsas para materiales de riesgo biológico en la bolsa blanca del kit. Selle la bolsa blanca.
- Almacene el kit para muestras en el refrigerador hasta que pueda devolverse al laboratorio.
- Si su proveedor requiere múltiples recolecciones, siga los pasos anteriores con un nuevo kit STUL, en un día diferente.

Paso 9: Devuelva el kit al laboratorio.

- Análisis de *C. difficile* (*C. diff*): las muestras deben devolverse al laboratorio dentro de las 12 horas de su recolección.
- Pruebas que no son de *C. difficile* (*C. diff*): Se pueden devolver al laboratorio otros análisis de heces en el plazo de uno a tres días desde la recolección.
- Si va a recolectar varias muestras en momentos separados según las instrucciones de su proveedor de atención médica, espere para devolver su kit hasta que se recolecte cada muestra.